

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "Shanghai Rongshun Hardware and Plastic" Co., Ltd, KHP

Гарантийные обязательства

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2

Срок гарантии 12 месяцев
Дата продажи _____
Сервисное обслуживание производится в Сервисном центре АРМЕД
Контактный телефон: _____
Адрес: _____

Кровать медицинская функциональная RS 105-B «АРМЕД» 4-х секционная



ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кровать медицинская многофункциональная серии RS105-B предназначена для использования как в лечебных учреждениях для ухода, диагностики и лечения пациентов под наблюдением врача, так и в домашних условиях для профилактики, лечения и восстановления больных.



1. Основные технические характеристики

Кровать

Кровать имеет 4-х секционную систему. Два рычага регулировки оснащены механическим приводом с червячной передачей для регулировки углов наклона спинной и ножной секций

Габариты транспортной упаковки (Д x Ш x В, мм) 2100 x 1000 x 200

Габариты (Д x Ш x В без ограждений, мм) 2150 x 1000 x 550

Вес нетто (кг) 75

Вес брутто (кг) 88,5

Площадь поверхности ложа (Д x Ш, мм) 1950 x 900

Высота ложа (мм) 550

Изменяемый диапазон углов наклона секций:

спинной секции 0° - 80°

ножной секции 0° - 35°

Колеса (мм) 125

Предельный вес нагрузки (максимальная суммарная нагрузка, кг) 250

Максимальная грузоподъемность (кг) 200

Размер основной трубки (Д x Ш x Т, мм) 30 x 50 x 2,0

Основные вращающиеся части толщиной (мм) 2,0

Рама и секции ложа изготовлены из стали и покрыты ударопрочной эпоксидной эмалью.

Торцевые ограждения изготовлены из ABS-пластика с меламиновыми вставками «под дерево».

Боковые ограждения изготовлены из металла и оснащены рычагами для опускания.

Колеса кровати имеют стальные несущие части, два из них с индивидуальными педальными тормозами.

2. Комплектация

Упаковка 1

1) Рама с закрепленными на ней секциями и механизмами – 1

2) Ножные опоры – 2

3) Колеса без тормозов – 2

4) Колеса с индивидуальными тормозами – 2

3) Торцевые ограждения – 2

4) Боковые ограждения с рычагами для опускания – 2

5) Подставка для судна – 1

6) Крепеж (комплект) – 1

- 7) Инфузионная стойка -1
- 8) Стойка для подтягивания пациента-1
- 7) Паспорт (инструкция) – 1

3. Сборка и подготовка к эксплуатации

Вскройте упаковку и проверьте комплектацию (см. п. 2)

При поставке с завода кровать разобрана на части для удобства доставки. Большая часть кровати (рама с закрепленными секциями) сложена и связана жгутами, а меньшая часть упакована в картон. Открывая упаковку изделия, нужно проверить целостность деталей и наличие документов. Сохраните документы для дальнейшего использования.

Порядок сборки

- 1) Прикрутите ножные опоры болтами к раме кровати.
- 2) В ножные опоры, имеющие внутреннюю резьбу, вкрутите несущие части колес, так же имеющие резьбу. (Колеса у изголовья – без тормозов, в ножной части – с тормозами)
- 3) Прикрепите боковые ограждения болтами.
- 4) По углам кровати имеются по два опорных штыря с фиксатором. Подняв фиксаторы, установите головную и ножную торцевые ограждения. Опустив фиксаторы, ограждения блокируются .
- 5) Подставка для судна съемная и может быть установлена на нижней поперечной планке рамы кровати в головной или ножной части.

Примечание

Кровать должна быть установлена на ровном полу без уклонов.

Выбор места для кровати должен исключать случайные удары и толчки.

Прочистить и продезинфицировать кровать перед первым и повторными использованиями.

4. Меры безопасности

Перед использованием необходимо проверить прочность фиксации компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

5. Эксплуатация

- 1) Регулировка положений секций

Ручки рычагов регулировки поверхности оборотно-складного типа. В исходном положении находятся под торцевым ограждением в ножной части кровати.

Правый рычаг для регулирования ножной секции, а левый рычаг для регулирования спинной секции.

При использовании рычагов застопорите кровать с помощью педалей на колесах в ножной части кровати.

Для регулирования секций надо выдвинуть рычаг из-под ограждения, сложенную ручку отвести в сторону. Вращая ручку, приведите секцию в необходимое положение. При использовании рычагов выдвигайте и убирайте ручки в исходное положение без усилий.

Если механизм регулировки кровати не используется, прокрутите ручку, сложите и, задвинув в горизонтальном положении, поместить под торцевое ограждение.

- 2) Боковые ограждения легко опускаются, что позволяет обеспечить быстрый доступ к пациенту. У основания расположен механизм с металлической pedalю. Приподняв pedalю снизу вверх, ограждение легко опускается вниз, подняв ограждение, оно без усилий зафиксировано.

- 3) Торцевые ограждения легко снимаются с упоров и вставляются на место. Для снятия с упоров поднимите фиксаторы в виде крючков вверх. С внутренней стороны имеются по два отверстия для установки дополнительных аксессуаров, таких как инфузионная стойка, устройство для подтягивания и т. п.

- 4) Колеса с pedalными тормозами защищают кровать с пациентом от случайных перемещений при ударе или давлении.

- 5) Бамперы расположены по углам кровати, защищая корпус от повреждений.

6. Обслуживание

- 1) Не демонтировать «ручку тяги» и «шкив тяги» «регулирующий винт» и другие части механизма.
- 2) Следует избегать царапин или вмятин на поверхностях деталей, на которых гальваническим способом нанесен слой металла, или на компонентах, покрытых эпоксидной эмалью.
- 3) Чистите и смазывайте металлические части и ручной рычаг передачи каждый год для продления срока эксплуатации изделия.